



DIH ビューアーの使い方 (1)

1. USERNAME(cytology), PASSWORD(cytology2010)を入力すると Slide Seminar 2010 のホルダーアイコンが現れます。このアイコンをダブルクリックします。




2. 7スライドの症例が表示されます。スライドを選択しダブルクリックします。

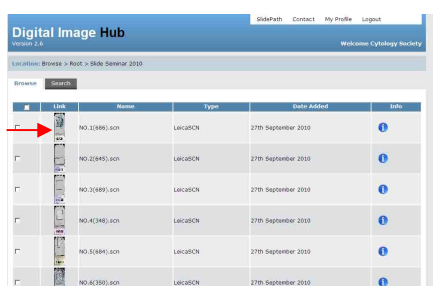

3. ビューアーが立ち上がります。画面上部の  をクリックし、画面左の **Select Image** をクリックすると複数スライドが表示されます。



スライドは最大5枚表示されます。ページの矢印をクリックすると残りのスライドが表示されます。

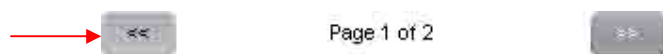


画面左のスライドを選択するとメイン画面にスライドが表示されます。

DIH ビューアーの使い方 (2)

1. はじめに

症例をクリックするとビューアーが開きます。

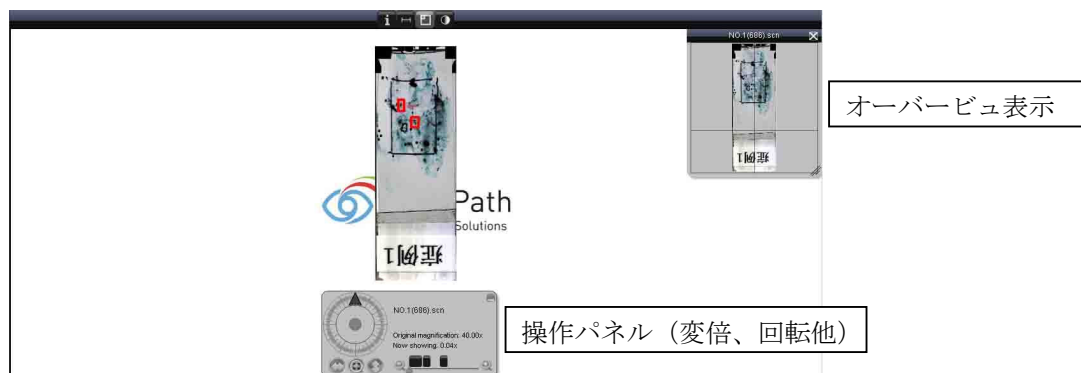

2. スライドの回転と観察エリア


操作パネルの三角マークを回転するとスライドが回転します。赤枠でエリアが指示されている症例は其の部分のみ観察が可能です。それ以外の部分は解像力が伴いません。



3. 倍率変換

マウスのホイールを回すとズームアップダウンができます。

操作パネル内の 4x,10x,20x,40x ボタン、又は、-、+ボタンをクリックすると倍率を変えることができます。拡大率を上げるときには観察したい部分を画面のセンターに移動します)

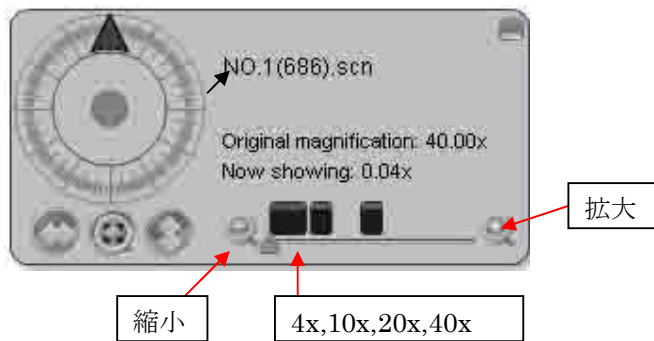


マウスを右クリックし、下記の表示から倍率を変換することができます。



4. サンプルの移動

マウスを左クリックしながらスライドを動かしたい方向へドラッグすることで、サンプルをスクロールすることができます。

5. 輝度の調整

画面上の  (Display Setting) をクリックすると Display Setting が表示されます。

Contrast バーを右に移動すると輝度を上げて観察できます。細胞が重なり合って輝度が不足している場合は利用してください。Reset ボタンをクリックすると元に戻ります。

