


本検査キットは、『標準ディサースリア検査』を円滑に実施するために必要な検査用具をまとめたものです。

| キット内容 | 個数 |
|------------------------|------|
| バイト・ブロック S (標準) サイズ | 1 |
| バイト・ブロック (無歯顎用) L サイズ | 1 |
| バイト・ブロック (無歯顎用) LL サイズ | 1 |
| バイト・ブロック ハンドル | 1 |
| クッションラバー | 5 |
| デンタルフロス | 1 |
| ストップウォッチ | 1 |
| ペンライト (乾電池付き) | 1 |
| 舌圧子 | 10 |
| ペットボトル (目盛り付き) | 1 |
| ストロー | 10 |
| ストローストッパー | 2 |
| 羽毛 | 2 |
| ディスポーザブルグローブ S・M サイズ | 各 10 |
| ノーズクリップ | 1 |
| 鼻息鏡 | 1 |
| 定規 | 1 |
| 舌用ガーゼ | 10 |
| ハンマー | 1 |
| 計算機 | 1 |

定価(本体 28,000 円+税)

※ 発声発語器官検査の③「呼気圧・持続時間」の測定（『標準ディサースリア検査』P.28 参照）ではペットボトルを使用しますが、その際に備え付けのストローストッパーを右図のように少し下方に向かって押し込みながらご使用ください。これにより隙間ができボトル内の圧と大気圧が一定になって、正しく検査が実施できます。もし他の器具などでストローを支える時も、必ず隙間をつくって内外の圧を一定にしてください。隙間がない、または小さいとブローイング時の抵抗が大きくなります。

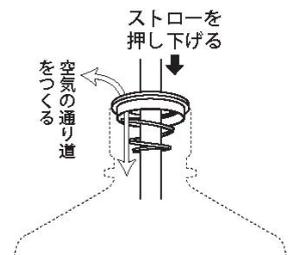

- ※ ストロー、舌圧子、舌ガーゼ、ディスポーザブルグローブなどの消耗品は各自で随時補充ください。
- ※ バイト・ブロックは常時滅菌して、ある程度常備しておきましょう。
- ※ ご購入時期により、セット内容の色や形が多少変わる可能性があります。ご了承ください。
- ※ 計算機、ストップウォッチには検査用電池がセットされています。ご購入時にもし電池切れの時は新しい電池と交換してください。
- ※ 弊社では、バイト・ブロック、クッションラバーを除いてバラ売りはしていません。
- ※ 『標準ディサースリア検査』に記載の、開口測定器、ノギスは、本キットでは定規で代用しています。必要な場合は下記の販売会社にお問い合わせください。

別売り

- 『標準ディサースリア検査』 インテルナ出版 定価 (本体 5,700 円+税)
付：記録用紙 5 部、検査資料 3 枚 (短文、長文、情景画)
- 『標準ディサースリア検査記録用紙』 20 部組み インテルナ出版 定価 (本体 3,600 円+税)
- 『標準ディサースリア検査 CD-ROM Ver.2.0』 インテルナ出版 定価 (本体 9,500 円+税)
標準ディサースリア検査の施行、解釈、データの管理などが迅速、効率的にできる。また、豊富な評価用基準スピーチ・サンプルを備える。日本語 Windows 2000/XP/Vista/7 対応 (いずれの OS も 32bit 版のみ)。
- 『標準ディサースリア検査 評価用基準スピーチ・サンプル集(Audio CD)』 インテルナ出版 定価 (本体 2,200 円+税)
- バイト・ブロック、クッションラバーなどの追加 インテルナ出版 (トランク中の「バイト・ブロック」一覧表参照)
- 開口測定器 ケイセイ医科工業(株) TEL：03-3816-2811 商品名「六角開口度スケール」
- ノギス (株)モリタ TEL：06-6380-2525 商品名「平行測定器」

 **インテルナ出版**


〒170-0003 東京都豊島区駒込 1-43-9 駒込 T S ビル Tel：03-3944-2591 (代表) 03-3944-2691 (販売)

Fax：03-5319-2440 ▶ホームページ <http://www.intern.co.jp/> ▶Eメール hanbai@intern.co.jp

「標準ディサースリア検査キット」

(フタ側) **ペンライト** **計算機** **定規**

上段

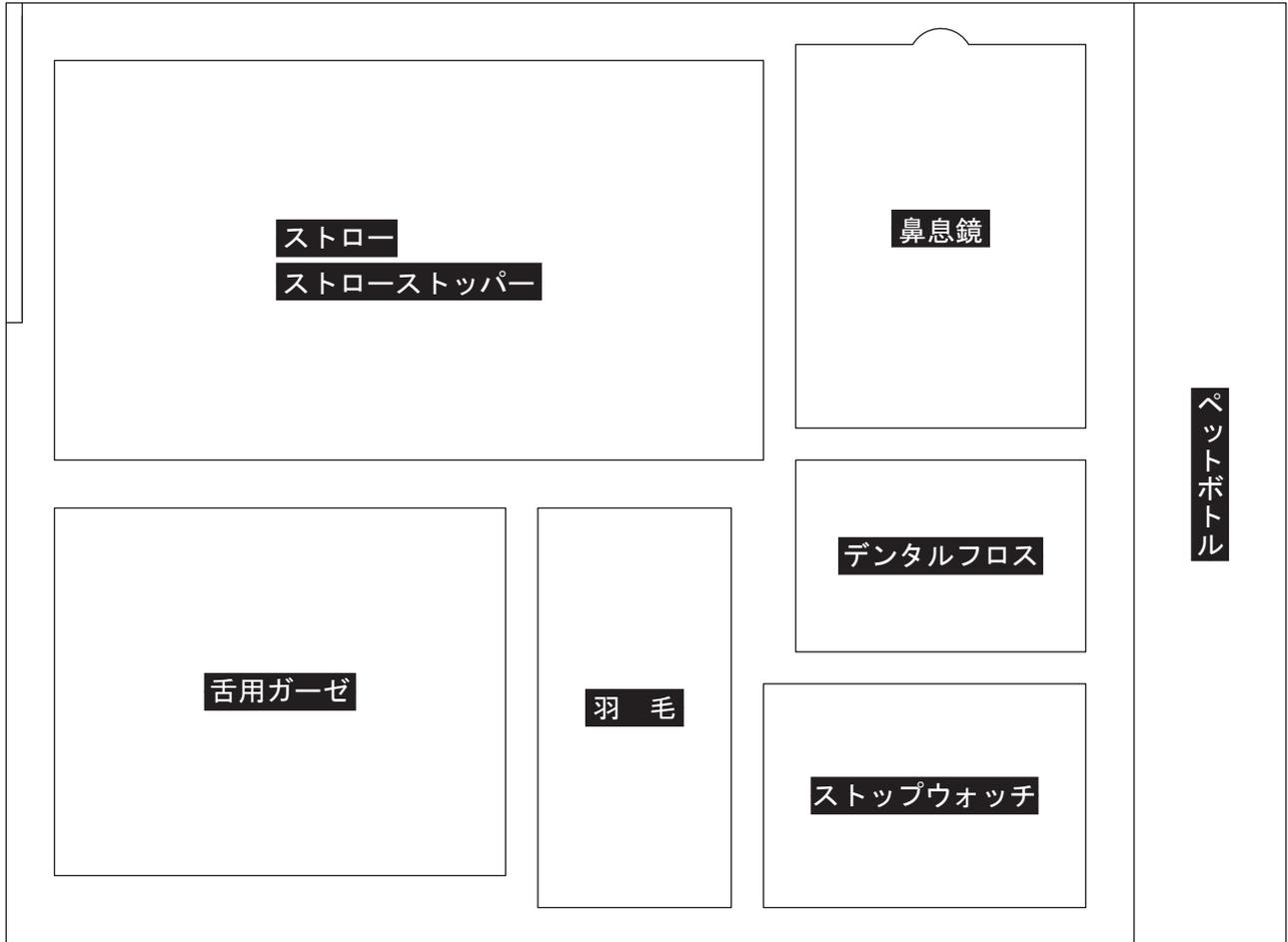

下段

