

言語聴覚療法用

バイト・ブロック

★バイト・ブロックは、構音器官の評価や治療に有用です。

★評価では、バイト・ブロックで下顎を固定して、舌、口唇の分離運動機能の分析や舌音、口唇音の構音の改善に使用します。

➡ 評価では、必ず標準サイズのみを使用してください。

➡ 治療では、機能の程度に応じて3種類（標準、M、Lサイズ）を使い分けてください。

➡ 無歯顎者には、無歯顎用バイト・ブロック（臼歯用Lサイズ、前歯用LLサイズ）をご使用ください。

- 衛生上、バイト・ブロックは各施設にて滅菌してご使用ください（ステンレス製）。
- ハンドルや、用意していただくひもは誤飲予防です。


評価での具体的な使用方法是『標準ディサースリア検査』（インテルナ出版発行）が参考になるでしょう。豊富に写真を添えて、わかりやすく解説されています。




インテルナ出版

〒170-0003 東京都豊島区駒込1丁目43-9
TEL(03)3944-2591 FAX(03)5319-2440
ホームページ <http://www.intern.co.jp/>
Eメール hanbai@intern.co.jp


使用法

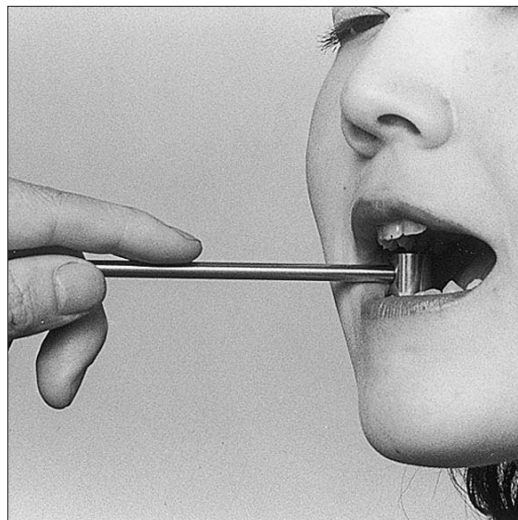

舌、舌音の評価や治療に使用するときは、ハンドル付の状態では、左右いずれかの上下顎臼歯間で軽く咬ませます。

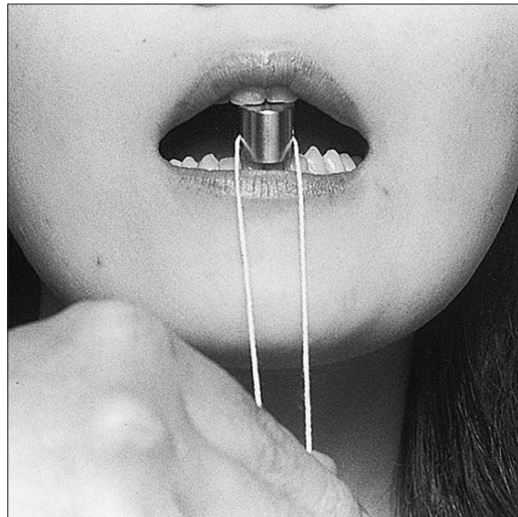


口唇、口唇音の評価や治療に使用するときは、ハンドルの代わりにヒモを用意していただきバイト・ブロックのネジ穴に通したうえで、上下顎切歯間で軽く咬ませます。

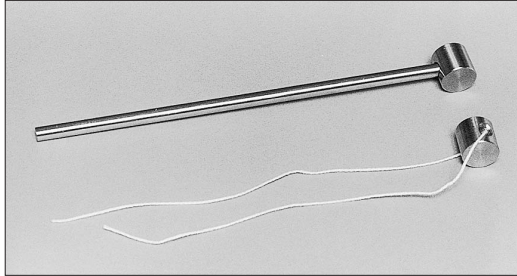

標準サイズのハンドル付と、ヒモを付けた状態

バイト・ブロック

(実寸)

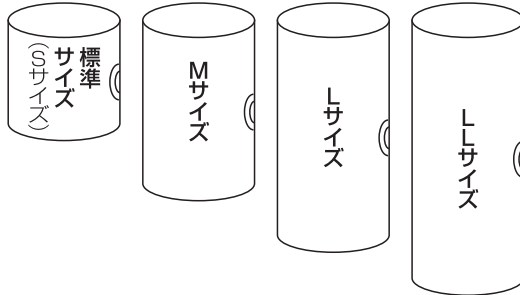

一般用 バイト・ブロック



名称	サイズ 高×径	用途 (評価)(治療)	定価 (本体+税5%)
標準サイズ (Sサイズ)	12×13ミリ	○ ○	630円
Mサイズ	19×13ミリ	○	735円
Lサイズ	25×13ミリ	○	840円

一般、無歯顎用 共通

名称	サイズ	用途	定価(本体+税5%)
ハンドル	152ミリ長×5ミリ径	バイト・ブロックを把持する	945円

*全て送料実費うけたまわります。

無歯顎用バイト・ブロック

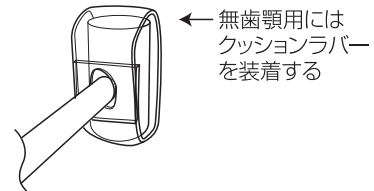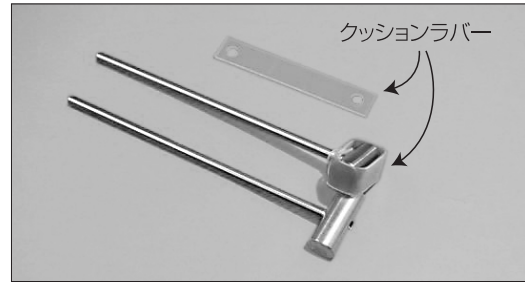

← 無歯顎用には
クッションラバー
を装着する

無歯顎用クッションラバーについて

- *無歯顎者の歯ぐきへの刺激を和らげるためのものです。
- *高温消毒済みなのでそのままご使用いただけます。
- *シリコンゴム製。20枚組み販売。
- *ご使用のたびに交換してください。

無歯顎用 バイト・ブロック

名称	サイズ 高×径	用途 (評価)(治療)	定価 (本体+税5%)
Lサイズ ★一般用と 共用できる	25×13ミリ	(臼歯用) ○ ○	840円
LLサイズ	30×13ミリ	(前歯用) ○ ○	945円
無歯顎用 クッション ラバー	85ミリ長× 13ミリ幅× 1ミリ厚	●無歯顎用バイト・ ブロックに 装着する。 ●Lサイズ、LL サイズ 兼用	20枚組み 1,050円